

**CONTROLE GLUCOSEMETER HEzorg****Gegevens patiënt:**

Patiëntnummer: .....

Voorletters + naam: .....

Meisjesnaam: .....

Geboortedatum: .....

Huisarts / specialist: .....

**Afslag ponsplaatje:****Informatie voor de patiënt**

Om te kijken of uw glucosemeter goed werkt wordt deze vergeleken met de laboratoriummethode.

Dit gaat als volgt:

- U komt naar het ziekenhuis of een prikpunt voor een bloedafname voor de periodieke diabetescontrole en neemt het aanvraagformulier voor het laboratorium **en** dit formulier mee.
- Ook neemt u uw eigen glucosemeter mee.
- Er wordt door de laboratoriummedewerker bloed bij u afgenomen.
- Direct na deze bloedafname meet u zelf uw bloedsuiker op uw eigen glucosemeter.
- U noteert de uitslag van de meting op uw eigen meter op dit formulier in het volgende vak en geeft het ingevulde formulier af aan de laboratoriummedewerker.

**In te vullen door de patiënt**

Datum meting: ..... Merk meter: ..... Type meter: .....

De uitslag van de bloedsuiker gemeten op de eigen glucosemeter is .....mmol/L.

Kruis aan indien van toepassing:

- De houdbaarheidsdatum van mijn strips is verlopen
- De code staat niet goed in mijn glucosemeter
- Niet van toepassing

**In te vullen door de laboratoriummedewerker**

Noteer het labnummer waaronder de bijbehorende bloedafname is ingelezen: .....

Stuur het formulier naar, of geef het formulier af bij **balie CDL**.

**In te vullen door administratief medewerker**

Verwerk de resultaten m.b.v. werklijst 78.

Uitgevoerd door: .....

Gecontroleerd door: .....