

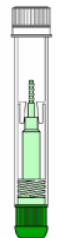









Urine	Feces	Diverse materialen								
<p>Urinepotje met geïntegreerd afname-systeem</p>  <p>Dysmorfe ery's: Binnen 1 uur na productie het hele potje inleveren bij ziekenhuislocatie Meander MC in Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk of Soest</p>										
<p>Klinische Chemie Urinebuizen</p> <p>Microbiologie Urinebuis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bacteriologie • Chlamydia (PCR) • GO (PCR) • Trichomonas (PCR) • Virus (PCR) • M. genitalium (PCR) 	<p>Klinische Chemie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Occult bloed <p>Microbiologie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parasieten (PCR) • Bacterieel (PCR) • Clostridioides • Helicobacter • Wormeieren/cysten • Virus (PCR) <p>Klinische Chemie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calprotectine • p-Elastase 	<p>Microbiologie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bacterieel • Gisten/Candida • MRSA • BRMO • Schimmel (oor) 	<p>Klinische Chemie Fertiliteitsonderzoek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semen collectie container <p>LET OP: in steriele verpakking meegeven</p>	<p>Microbiologie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chlamydia (PCR) • GO (PCR) • Trichomonas (PCR) • Bacteriele vaginose (PCR) • M. genitalium (PCR) 	<p>Microbiologie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinkhoest (PCR) • SARS CoV-2 (PCR) 	<p>Microbiologie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virus (PCR) • Atyp. respiratoire verwekkers (PCR) <p>NB Niet gebruiken voor HPV onderzoek z.o.z.</p>	<p>Microbiologie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sputum • Haren • Nagels • Huidschilfers • Vloeibare punctaten • Pus 			
 <p>8 ml 4 ml 4 ml buis</p>										
<p>Buizen via afname systeem vullen Alle buizen inleveren</p> <p>24-uurs-urines in bokalen (2L)</p>						<p>NB. Kleur van de dop kan variabel zijn</p>				
Alle materialen, ook de MRSA /BRMO setjes zijn verkrijgbaar bij de bode										

Pathologisch onderzoek

Weefselonderzoek

- Gebufferde formaldehyde 4%

Cervixuitstrijkje voor HPV

- Thinprep preservecyt solution
- Cervix-brush

10 ml potje



20 ml potje



Cervix-brush



Identificatie

Op aanvraagformulier en materiaal de volgende gegevens vermelden:

- Naam + voorletters
- Geboortedatum
- BSN nummer
- Geslacht
- Afname-datum
- MRSA/BRMO: herkomst materiaal

Bij een zorgdomein aanvraag gaat dat automatisch.

BRMO-screening

Voor het opsporen van dragerschap van MRSA/BRMO verwijzen wij u naar:

[HTTPS://MCCCE.nl/werkafspraken.html](https://mccce.nl/werkafspraken.html): kies Medische Microbiologie BRMO en daarna screenen.

BRMO-setjes zijn verkrijgbaar bij de Bodedienst

of kunnen telefonisch worden aangevraagd op 033-8502103 (afdeling Infectiepreventie)

Transport

Materialen, vergezeld van een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier kunnen:

- Meegestuurd worden met de Bodedienst
- Door de patiënt worden afgegeven op een Meander prikpunt of in het Meander op de Orangerie

Bewaarcondities

Alle materialen dienen bij voorkeur binnen 24 uur te zijn ingeleverd.

Na afname koel bewaren heeft ten alle tijden de voorkeur

Uitzonderingen:

Urine voor Klinisch chemisch onderzoek **moet** binnen 24 uur ontvangen zijn op de afdeling Klinische Chemie.

De **houdbaarheid van de kweekmedia** staat vermeld op de verpakking. Indien de uiterste houdbaarheid datum is bereikt: medium is niet meer te gebruiken.