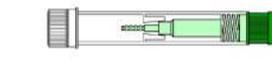


Urine		Feces				Diverse materialen			
<p>Urinepotje met geïntegreerd afname-systeem</p>  <p>Dysmorfe ery's: Binnen 1 uur na productie het hele potje inleveren bij ziekenhuislocatie Meander MC in Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk of Soest</p>	<p>Klinische Chemie Urinebuizen</p> <ul style="list-style-type: none"> Bacteriologie Bacteriologie Chlamydia (PCR) GO (PCR) Trichomonas (PCR) Virus (PCR) M. genitalium (PCR) 	<p>Klinische Chemie</p> <ul style="list-style-type: none"> Occult bloed 	<p>Microbiologie</p> <ul style="list-style-type: none"> Parasieten (PCR) Bacterieel (PCR) Clostridioides Helicobacter Wormeieren/cysten Virus (PCR) <p>Klinische Chemie</p> <ul style="list-style-type: none"> Calprotectine p-Elastase 	<p>Microbiologie</p> <ul style="list-style-type: none"> Bacterieel Gisten/Candida MRSA BRMO Schimmel (oor) 	<p>Klinische Chemie Fertilitetsonderzoek</p> <ul style="list-style-type: none"> Semen collectie container <p>LET OP: in steriele verpakking meegeven</p>	<p>Microbiologie</p> <ul style="list-style-type: none"> Chlamydia (PCR) GO (PCR) Trichomonas (PCR) Bacteriële vaginose (PCR) M. genitalium (PCR) 	<p>Microbiologie</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinkhoest (PCR) SARS CoV-2 (PCR) Resp. viraal panel (PCR) Atypische respiratoire verwekkers (PCR) 	<p>Microbiologie</p> <ul style="list-style-type: none"> Virus (PCR) Atyp. respiratoire verwekkers (PCR) <p>NB Niet gebruiken voor HPV onderzoek z.o.z.</p>	<p>Microbiologie</p> <ul style="list-style-type: none"> Sputum Haren Nagels Huidschilfers Vloeiabele punctaten Pus
<p>8 ml 4 ml</p>  <p>+</p> <p>4 ml buis</p> 	<p>Buizen via afname systeem vullen Alle buizen inleveren</p>								
24-uurs-urines in bokalen (2L)		Alle materialen, ook de MRSA /BRMO setjes zijn verkrijgbaar bij de bode							
<p>NB. Kleur van de dop kan variabel zijn</p>									

Materialenkaart Laboratoriumcentrum voor Huisartsen

Pathologisch onderzoek	
Weefselonderzoek <ul style="list-style-type: none"> Gebufferde formaldehyde 4% 	Cervixuitstrijkje voor HPV <ul style="list-style-type: none"> Thinprep preservecyt solution Cervix-brush
10 ml potje 	20 ml potje 
	Cervix-brush 

Identificatie

Op aanvraagformulier en materiaal de volgende gegevens vermelden:

- Naam + voorletters
 - Geboortedatum
 - BSN nummer
 - Geslacht
 - Afname-datum
 - MRSA/BRMO: herkomst materiaal
- Bij een zorgdomein aanvraag gaat dat automatisch.

BRMO-screening

Voor het opsporen van dragerschap van MRSA/BRMO verwijzen wij u naar: [HTTPS://MCCCE.nl/werkafspraken.html](https://mccce.nl/werkafspraken.html); kies Medische Microbiologie BRMO en daarna screenen.

BRMO-setjes zijn verkrijgbaar bij de Bodedienst of kunnen telefonisch worden aangevraagd op 033-8502103 (afdeling Infectiepreventie)

Transport

Materialen, vergezeld van een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier kunnen:

- Meegestuurd worden met de Bodedienst
- Door de patiënt worden afgegeven op een Meander prikpunt of in het Meander op de Orangerie

Bewaarcondities

Alle materialen dienen bij voorkeur binnen 24 uur te zijn ingeleverd.

Na afname koel bewaren heeft ten alle tijden de voorkeur

Uitzonderingen:

Urine voor Klinisch chemisch onderzoek **moet** binnen 24 uur ontvangen zijn op de afdeling Klinische Chemie.

De **houdbaarheid van de kweekmedia** staat vermeld op de verpakking. Indien de uiterste houdbaarheid datum is bereikt: medium is niet meer te gebruiken.