

Instructie afname

Chlamydia / Gonorrhoe / Trichomonas



Nieuw afnamesetje



Vaginaal (zelf) afname:

- a. wattenstok in vagina inbrengen tot ongeveer 5 cm, wattenstok zachtjes 10 sec ronddraaien tegen binnenwand vagina
- b. wattenstok in container plaatsen en steel op breekpunt afbreken, dop container goed sluiten
- c. etiket geheel invullen en op container plakken
- d. container bewaren tussen 4 en 25 °C

Cervix afname (door arts/assistente):

- a. wattenstok in endocervicaal kanaal brengen, wattenstok 10 sec ronddraaien
- b. vervolg procedure als boven vanaf b

Urethra afname (door arts/assistente):

- a. wattenstok 2 tot 4 cm in urethra inbrengen, wattenstok zachtjes 5 seconden ronddraaien
- b. vervolg procedure als boven vanaf b
Wattenstok is ook geschikt voor Trichomonas-onderzoek.

Urine afname (door patiënt)

- a. de patiënt mag niet geplast hebben in het uur dat de monsterafname voorafgaat
- b. gebruik een urinekweekpotje (witte dop); de eerste 20 à 30 ml urine van de urineplas opvangen in het potje (dus eerste deel van de plas)
- c. schrijf naam/geb. datum en afnamedatum op urinecontainer en bij voorkeur bewaren bij 2°C tot 8°C

Bewaren van collectie kit voor afname:

Dit kan bij kamertemperatuur; verloopdatum van de kit is op de verpakking aangegeven.

Indien gevoeligheidsbepaling van gonorrhoe gewenst is moet er ook een kweek in AMIES medium met charcoal (zwart) ingezonden worden. Binnen 6 uur naar laboratorium brengen.